

Postřiková dezinfekce

MD

Pro povrchovou dezinfekci neinvazivních zdra-votnických prostředků.

Alkohol se nedoporučuje používat na zubářské/lékařské nástroje.

BPR

Na dezinfekci povrchů. Použijte biocidní prostředky bezpečně a udržitelně.

Tento výrobek by měl být používán v souladu se štítkem na výrobku.

Návod k použití: Nastříkejte ze vzdálenosti 30 cm na čistý povrch a na předměty určené k dezinfekci tak, aby byly zcela vlhké, a nechte dezinfekční prostředek působit 60 sekund. Ponechte postřik odpařovat. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost (60 sec): Baktericidní včetně VRE. Yeasticidní. Mycobactericidní. Tuberkulocidní. Omezené Virucidní. Neopouzdřené viry: Murine norovirus, Adenovirus 5 a opouzřené viry zahrnující (60 sec): virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), virus hepatitidy Delta, Virus lidské imunodeficiency (HIV), chřipkový virus, který zahrnuje viry chřipky pro člověka, ptáci a prasečí chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles, Poxviridae.

Testováno podle norem: EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13697, EN 13624.

Složení: Etanol (64-17-5) 63 hm. % (630g/kg), vodou, parfém.

Nebezpečí. H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. **Postupy pro první pomoc.** P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Postupy pro případ požáru.** P370+378: V případě požáru: K uhašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu nebo oxid uhličitý. **Skladování.** P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P235: Uchovávejte v chladu. **Kontraindikace.** Neslučitelné materiály: Měď, Hliník. Nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol. **Metody nakládání s odpady.** Obsah/nádobu zlikvidujte podle místních předpisů. Nelikvidujte cestou odpadu či vodních toků.

Sredstvo za dezinfekciju površina

MD

Za dezinfekciju površina neinvazivnih medicinskih uređaja.

Ne preporučuje se primjena alkohola na stomatološkim/medicinskim instrumentima.

BPR

Za dezinfekciju površina. Upotrebjavajte biocide na siguran i održiv način.

Ovaj proizvod potrebno je koristiti u skladu s opisom na naljepnici proizvoda.

Upute za uporabu: Na površine i predmete koje treba dezinficirati, nanesite sprej s udaljenosti od 30 cm tako da budu u potpunosti navlaženi i ostavite sredstvo za dezinfekciju da djeluje tijekom 60 sekundi. Pričekajte da sprej ispari. Samo za profesionalnu uporabu.

Djelotvorni spektar (60 sek.): Baktericidna uključujući VRE. Aktivnost protiv kvasaca. Tuberkulocidna i mikobaktericidna aktivnost. Virusi koji su uključeni: virusi bez ovojnice: adenovirus, norovirus. Virusi s ovojnicom: virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV), virus humane imunodeficiency (HIV), virus gripe, virus hepatitisa D, koronavirus, filovirusi (virus ebola), virus rubele, virus ospice, herpesvirusi, virus bjesnoće, Poxviridae. **Ispitano prema standardima:** EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13697, EN 13624.

Sastav: Etanol (64-17-5) 63% w/w (630g/kg), vodom, parfém.

Opasnost. H225: Lako zapaljiva tečnost i para. H319: Dovodi do jake iritacije oka. **Postupci za prvu pomoć.** P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom. P305+351+338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. **Postupak u slučaju požara.** P370+378: U slučaju požara: za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili ugljični dioksid. **Pohrana.** P210: Čuvati od topline/iskri/otvorenih plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P403+P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. P235: Održavati hladnim. **Kontraindikacije.** Nekompatibilni materijali: bakar, aluminij. Ne upotrebljavati na površinama osjetljivim na alkohol. **Zbrinjavanje.** Zbrinite sadržaje/spremnik u skladu s važećim propisima. Nemojte ispuštati tekućinu u odvođe ili rijeke.