







## CZ

**Prostředek pro denní čištění a dezinfekci odsávacích systémů**

Pro denní čištění a údržbu stomatologických odsávacích systémů. Lze ho použít v mokrych, suchých a polosuchých odsávacích systémech.

**Návod k použití. Denně:** Přidejte 20 ± 1 ml koncentráta do 980 ml teplé vody (2% roztok). Aspirujte pomocí odsávacích zkumavek s velkým a malým objemem. Ponechte působit minimálně 15 minut (plnou účinnost dosáhnete 60minutovým působením) a poté pečlivě opláchněte čistou vodou. Pouze pro profesionální použití.

**Účinnost:** Baktericidní (15 minut) včetně Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila, Yeasticidní (15 minut), VHB, VHC, Virus lidské imunodeficiency (15 minut), Tuberkulocidní (60 minut), Fungicidní (30 minut).

**Testováno podle norem:** EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

**Složení:** Voda, Dimethyldioctylamoniuchlorid, dipropylenglykol, 2-aminoethanol, ethyldiamintetraacetát tetrasodný, ethanol, kyselina citronová, neionogenní tenzidy, odpěňovací přísada, barvivo.

**Nebezpečí.** H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280: Použijte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+330+331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **Skladování.** P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P235: Uchovávejte v chladu. **Kontraindikace.** Měď, Hliník. **Metody nakládání s odpady.** Nelikvidujte cestou odpadu či vodních toků.

## HR

**Sredstvo za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju aspiratora**

Za svakodnevno čišćenje i održavanje sustava stomatoloških aspiratora. Može se upotrebljavati na vlažnim, suhim te poluvlažnim/suhim usisnim sustavima.

**Upute za svakodnevnu uporabu:** Dodajte 20 ml ± 1 ml koncentrata u 980 ml tople vode (2 %-tna otopina). Aspirirajte kroz usisne cijevi velikog i malog volumena. Ostavite najmanje 15 minuta (za postizanje potpune djelotvornosti ostavite 60 minuta) te potom temeljito isperite čistom vodom. Samo za profesionalnu uporabu.

**Djelotvorni spektar:** Baktericidna (15 min) uključujući Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Aktivnost protiv kvasaca (15 min), virus hepatitisa B (15 min) virus hepatitisa C (15 min), virus humane imunodeficijencije (15 min). Tuberkulocidna (60 min). Fungicidna (30 min).

**Ispitano prema standardima:** EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

**Sastav:** Voda, Dimetilidoktil-amonijev klorid, dipropilen glikol, 2-aminoethanol, tetranatrijev etilen diamin tetra-acetat, etanol, limunska kiselina, neionski surfaktant, sredstvo protiv pjenjenja, bojilo.

**Opasnost.** H314: Uzrokuje teške opekline kože i ožljeđe oka. P260: Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301+330+331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303+361+353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom. P304+340: AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. P305+351+338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. **Pohrana.** P403+P233: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P235: Održavati hladnim. **Kontraindikacije.** bakar, aluminij. **Postupci zbrinjavanja.** Nemojte ispuštati u odvođe ili rijeke.