

Dezinfekční a mycí prostředek na nástroje

Dezinfekční a mycí koncentrát na nástroje, vrtáky a endodontické nástroje a položky. Bez obsahu chlóridů, aldehydů a fenolu, s vynikající materiálovou snášenlivostí a širokou mikrobiologickou účinností.

Návod k použití: Přidejte 20 ± 1 ml do 980 ml čisté vody, čímž získáte 2% roztok; pokud chcete vytvořit 4% roztok, přidejte 40 ± 1 ml do 960 ml. Doporučujeme ponechat 4% roztok působit 60 minut, dosáhnete tak plnou účinnost. Po dezinfekci důkladně opláchněte nástroje RO nebo destilovanou vodou, než přistoupíte k dalšímu zpracování a sterilizaci. Dodržujte pokyny výrobce nástroje pro opětovné zpracování. Roztok vyměňujte každý den. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost 2%: Baktericidní, vč. MRSA (15 min). Yeasticidní (15 min). Opouzděné viry zahrnující (15 min): virus hepatitidy B, virus hepatitidy C, virus hepatitidy Delta, Virus lidské imunodeficiency (HIV), chřipkový virus, který zahrnuje viry chřipky pro člověka, ptací a prasečí chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), Rubella, Rabies, Measles.

Účinnost 4%: Viz výše a dále Neopouzděné viry (30 min): Murine norovirus, Adenovirus 5. Mycobactericidní, Tuberkulocidní (60 min).

Testováno podle norem: EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Složení: Voda, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) amoniumpropionát, alkoholy, C9-11, ethoxylované, N,N-bis(karboxylatomethyl)-L-glutamát tetrasodný, monoethanolamin, inhibitor koroze, aroma, barvivo.

Nebezpečí: H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P301+330+331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladování: P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P235: Uchovávejte v chladu. P410: Chraňte před slunečním zářením. **Kontraindikace:** Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Teplý. **Postupy pro likvidaci.** Koncentrát nevylejte do odpadu ani do vodních toků.

Sredstvo za dezinfekciju i čišćenje instrumenata

Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje instrumenata, svrdala i endodontskih instrumenata i predmeta. Ne sadrži klorid, aldehid i fenol, ima kompatibilnost s mnogim materijalima i široku mikrobiološku djelotvornost.

Upute za uporabu: Dodajte 20 ml ± 1 ml u 980 ml čiste vode za 2 %-tnu otopinu, 40 ml ± 1 ml u 960 ml za 4 %-tnu otopinu. Za postizanje potpune djelotvornosti upotrijebite 4 %-tnu otopinu tijekom namakanja od 60 minuta. Nakon dezinfekcije, a prije daljnje obrade i sterilizacije, temeljito isperite instrumente vodom s reverznim osmozom ili destiliranom vodom. Pridržavajte se uputa za ponovnu obradu koje je izdao proizvođač instrumenta. Svaki dan zamijenite otopinu. Samo za profesionalnu uporabu.

Djelotvorni spektar 2%: Baktericidna uključujući MRSA (15 min). Aktivnost protiv kvasaca (15 min). Virusi s ovojnicom (15 min): virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV), virus humane imunodeficiencije (HIV), virus gripe, virus hepatitisa D, koronavirus, filovirusi (virus ebola), virus rubele, virus ospica, herpesvirusi, virus bjesnoće.

Djelotvorni spektar 4%: sve prethodno navedeno i uključujući virusi bez ovojnice (30 min): adenovirus, norovirus, Tuberkulocidna i mikobaktericidna aktivnost (60 min).

Ispitano prema standardima: EN 14885, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sastav: Voda, N-(3-aminopropil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, N,N-didecyl-N-metil-poli(oksietil) amonijev propionat, alkoholi, C9-11, etoksilirani, tetranatrijev N,N-bis(karboxilatometil)-L-glutamát, monoethanolamin, inhibitor korozije, aroma, boja.

Opasnost: H315: Nadražuje kožu. H318: Uzrokuje teške ozljede oka. H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. P301+330+331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P302+P352: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P305+351+338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. **Pehrana.** P403+P233: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P235: Održavati hladnim. P410: Zaštititi od sunčevog svjetla. **Kontraindikacije.** Uvjeti koje treba izbjegavati: toplina. **Postupci zbrinjavanja.** Nemojte ispuštati u odvode ili rijeke.